

**Dziana siatka wiskozowa impregnowana miodem Manuka (100%)**

## **Opis produktu**

Activon® Tulle to opatrunek pierwotny z dzianej siatki wiskozowej impregnowanej 100% miodem Manuka o jakości medycznej. Activon® Tulle wytwarza wilgotne środowisko dla gojenia rany i skutecznie eliminuje nieprzyjemny zapach, zapewniając działanie przeciwbakteryjne. Activon® Tulle jest idealnie dopasowany do oczyszczania płytkich ran z tkanek martwiczych i wysięku lub w sytuacjach, kiedy ilości wysięku maleją.

## **Wskazania**

Może być stosowany na rany pośredniej i pełnej grubości, w tym: rany z tkanką martwiczą wilgotną, odleżyny, owrzodzenia podudzi, rany chirurgiczne, oparzenia, zakażenie rany, miejsca po pobraniu przeszczepów skóry oraz rany o nieprzyjemnym zapachu.

## **Sposób użycia**

Umieścić bezpośrednio na powierzchni rany (dowolną stroną), można przycinać w celu dopasowania do kształtu rany. Pokryć opatrunkiem wtórnym. W celu pokrycia większych powierzchni opatrunek można rozwinąć, jednak w ten sposób zmniejszy się stężenie miodu, skuteczność związana jest z objętością dostępnego miodu.

## **Częstotliwość zmian opatrunku**

Częstotliwość zmian opatrunku zależy od intensywności wysięku, płynu śródmiąższowego, obrzęku, trybu leczenia, jednak Activon można pozostawić na ranie nawet na okres do 7 dni. W przypadku znacznego rozjaśnienia koloru opatrunku należy go zmienić celem utrzymania skutecznego poziomu miodu na ranie.

## **Przeciwwskazania**

Zawiera glukozę. Nie stwierdzono podwyższenia poziomu cukru we krwi podczas stosowania opatrunku, jednak zaleca się monitorowanie poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą. Nie używać w przypadku alergii na produkty pszczele. Zaaplikowany miód Activon może wywołać dyskomfort, dlatego w zależności od rodzaju rany może być konieczne podanie środka przeciwbólowego. W przypadku nie ustępującego bólu, zaleca się zaprzestanie stosowania opatrunku oraz przemycie rany roztworem soli fizjologicznej.

## **Utylizacja**

Zużyty opatrunek traktować jako odpad medyczny.

## **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.