



Advancis
Medical

Lawmoor Business Park, Kirgby-in-Ashfield
Nottingham, NG17 7JZ, England

Dystrybutor w Polsce:



ul. Skłodowskiej 7
97-225 Ujazd
tel.: +48 44 719 23 40
fax.: +48 44 719 28 39
www.kikgel.com.pl
e-mail: kik@kikgel.com.pl

Advasil conform

Opatrunek silikonowy stosowany w leczeniu blizn

Dystrybutor w Polsce:



Opis produktu

Advasil conform jest miękkim, lekkim, samoprzylegającym i dostosowującym się do kształtu rany opatrunkiem silikonowym zintegrowanym z warstwą filmu poliuretanowego, który chroni przed przywieraniem do odzieży pacjenta.

Wskazania

W leczeniu blizn hipertroficznym i keloidów.

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany otwarte. Niewskazany u pacjentów ze zmianami dermatologicznymi i/lub ze zranioną skórę.

Sposób użycia

Wyjąć Advasil conform z opakowania, odkleić zabezpieczającą folię i położyć opatrunek na bliznę stroną z żelem. W przypadku mniejszych blizn można dociąć taką część opatrunku Advasil conform, jaka pokryje w całości miejsce blizny. Przy dużych bliznach Advasil conform można układać tuż obok siebie. W celu dodatkowego zabezpieczenia Advasil conform można zabezpieczyć taśmą, bandażem lub filmem poliuretanowym.

Zaleca się mycie opatrunku Advasil conform przynajmniej raz dziennie w roztworze ciepłej wody i łagodnego mydła. Należy unikać intensywnych detergentów, ponieważ mogą one doprowadzić do kruszenia się silikonu i/lub podrażnienia skóry.

Delikatnie osuszać opatrunek za pomocą łagodnej ściereczki. Przed ponowną aplikacją lub podczas przechowywania trzeba zwrócić uwagę, aby opatrunek był całkowicie suchy. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Ważne, aby skóra pod opatrunkiem była czysta i sucha, codziennie należy przemywać obszar skóry.

Częstotliwość zmian opatrunku

Czas utrzymania opatrunku na skórze powinien być stopniowo zwiększany, początkowo jednak opatrunek należy utrzymywać na bliznie maksymalnie do dwóch godzin. Okres aplikacji należy wydłużać po dwie godziny dziennie, aż możliwe będzie pozostawienie Advasil conform na 24 godziny. Jeśli podczas kontaktu opatrunku ze skórą powstanie jakiegokolwiek podrażnienie lub alergia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Jeżeli żel zacznie ulegać rozwarstwieniu należy go odstawić i użyć nowy opatrunek.

Utylizacja

Zużyty wyrób traktować jako odpad medyczny.

