

# REF ELEGANT



- PL LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA  
REGULOWANA
- EN ALUMINIUM ADJUSTABLE CANE
- CZ HŮL DURALOVÁ PODPŮRNÁ NASTAVITELNÁ  
ODĽAHČENÁ NASTAVITEĽNÁ PALICA
- SK ODĽAHČENÁ NASTAVITEĽNÁ PALICA
- PT BENGALA AJUSTÁVEL CABO MADEIRA
- EE REGULEERITAV KÄMISKEPP ALUMIINIUMIST
- LV SPIEKĪS NO ALUMĪNIJA AR KOKA ROKTURI,  
REGULĒJAMS
- LT ALIUMININĖ REGULIUOJAMO AUKŠČIO  
LAZDELĖ
- RO BASTON ALUMINIU REGLABIL
- SI PALICA SPREHAJALNA ALUMINIJASTA
- SE ALUMINIUM JUSTERBAR KÄPP
- RU ТРОСТЬ АЛЮМИНИЕВАЯ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
- HR ALUMINIJSKI ŠTAP ZA HODANJE PODESIVE  
VISINE
- BA ALUMINIJSKI PRILAGODLJIVI ŠTAP



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laska inwalidzka aluminiowa, regulowana


Kod produktu: ELEGANT



## 1. Wykonanie

Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem wykonana jest z tworzywa sztucznego. Posiada szeroki zakres dostosowania dzięki skokowej regulacji długości. Trzon zakończony jest miękką gumową nasadką.

- a) uchwyt
- b) pasek na rękę
- c) regulacja wysokości – sztyft blokujący
- d) gumowa nasadka

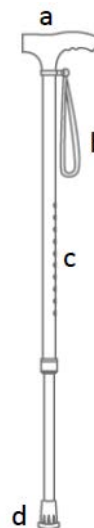

## 2. Zastosowanie

Laska regulowana jest sprzętem pomocniczym służącym do zwiększenia powierzchni pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po urazie kończyn dolnych lub tułowia.

**Przeciwwskazania:** Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na lasce.

### 3. Regulacja

Aby wyregulować laskę należy wcisnąć metalowy sztyft i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy metalowego sztyftu. Laska jest regulowana skokowo co 2,5 cm w zakresie 70-93 cm.

- Długość laski dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 20°.
- Laska powinna być indywidualnie dostosowana do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt laski znajdował się na wysokości stawu biodrowego.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie sztyftu i upewnić się, że laska jest stabilna.

**UWAGA!** W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się o lasce, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje.

### 4. Specyfikacja techniczna

**TYP:** regulowana

**Kolor:** srebrno-niebieski, brązowy

**Regulacja wysokości:** 70-93 cm

**Maksymalna obciążenie:** 136 kg

**Waga laski:** 0,38 kg

### 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**










## 6. Konserwacja

- Laskę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)  
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie I, data aktualizacji 28.10.2022





Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie I, data aktualizacji 28.10.2022