

**Nieprzywierający opatrunek z siatki wiskozowej powlekany miodem Manuka (99%) i olejkiem Manuka (1%)**

### **Opis produktu**

Actilite® to opatrunek o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego zawierający 99% miodu Manuka i 1% olejku Manuka. Opatrunek ten jest przeznaczony do ochrony rany, przyspieszania procesu gojenia i umożliwiania odprowadzania wysięku. To idealny wybór w przypadku ran pokrywających się nabłonkiem, które uważane są za obciążone ryzykiem ponownego zakażenia.

### **Wskazania**

Może być stosowany na każdy rodzaj ran, w tym: rany powierzchowne, rany pośredniej i pełnej grubości, np. skaleczenia i otarcia, odleżyny, owrzodzenia podudzi, rany chirurgiczne, oparzenia, zakażenie rany, miejsca po pobraniu przeszczepów skóry. Mogą pomóc w opracowaniu chirurgicznym rany, jeżeli są stosowane w połączeniu z Activon Tube.

### **Sposób użycia**

Zdjąć przezroczystą folię ochronną z obu stron opatrunku. Umieścić bezpośrednio na ranie, można przycinać w celu dopasowania do kształtu rany. W zależności od rodzaju tkanki w obrębie łóżyska rany lub poziomu wysięku, drugim stosowanym opatrunkiem może być folia poliuretanowa lub opatrunek absorpcyjny.

### **Częstotliwość zmian opatrunku**

Częstotliwość zmian opatrunku zależy od intensywności wysięku, płynu śródmiąższowego, obrzęku, trybu leczenia, jednak Activon można pozostawić na ranie nawet na okres do 7 dni. Opatrunek będzie mniej skuteczny w przypadku rozcieńczenia przez wysięk z rany. W przypadku znacznego rozjaśnienia koloru opatrunku należy go zmienić celem utrzymania skutecznego poziomu miodu na ranie. Przy zmianie opatrunku zaleca się przemyć ranę roztworem soli fizjologicznej.

### **Ostrzeżenie**

Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie jednorazowego użytku. Ponowne użycie urządzenia niesie ryzyko infekcji i nie jest zalecane.

### **Przeciwwskazania**

Nie stosować u pacjentów uczulonych na jad pszczoły, produkty pszczele lub olejki eteryczne, tj. olejki z drzewa herbacianego. Actilite® zawiera glukozę. Nie stwierdzono podwyższenia poziomu cukru we krwi podczas stosowania opatrunku, jednak zaleca się monitorowanie poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą. Zaaplikowany miód Activon może wywołać dyskomfort, dlatego w zależności od rodzaju rany może być konieczne podanie środka przeciwbólowego. W przypadku nieustępującego bólu, zaleca się zaprzestanie stosowania opatrunku oraz przemyć ranę roztworem soli fizjologicznej.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

### **Utylizacja**

Zużyty opatrunek traktować jako odpad medyczny.