

# yellowTAPE

## TAŚMA DO KINESIOTAPINGU - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### WŁAŚCIWOŚCI

- Taśma bawełniana, rozciąga się do ok. 140% swojej długości początkowej, zapewnia dostęp powietrza do skóry
- Akrylowy, bezlateksowy, nałożony faliście klej
- Może być noszona przez kilka (3-7) dni, o ile nie ulegnie uszkodzeniu lub odklejeniu
- Taśma jest naniesiona na papier chroniący warstwę klejącą z Ok. 10% rozciągnięcia początkowego
- Dostępne kolory: żółty, cielisty, czarny, różowy, niebieski, tęczyowy zygzak
- Dostępne rozmiary: 5cm x 5m, 7,5cm x 5m
- Produkt ofoliowany, folia zachodzi na brzegi taśmy chroniąc przed uszkodzeniem i zabrudzeniem warstwy klejącej
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Okres trwałości: 3 lata

### ZASTOSOWANIE

- Wyrób przeznaczony do oklejeń na powierzchnię ciała zgodnie z zasadami techniki kinesiotalpingu (plastowania dynamicznego) jako profilaktyka urazowa bądź łagodzenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Należy odpowiednio dobrać szerokość taśmy do miejsca i rodzaju aplikacji.
2. Odciąć ustaloną długość taśmy z rolki, pamiętając o jej elastyczności i właściwym dla danego rodzaju aplikacji rozciągnięciu.
3. Przyciąć taśmę w wybrany kształt (I, Y, X, wachlarz).
4. Aby zminimalizować ryzyko odklejania się aplikacji od ciała zaokrąglić brzegi taśmy.
5. Jeśli część ciała, która ma być oklejana jest mocno owłosiona, zaleca się zgolenie włosów, aby zwiększyć przyleganie taśmy.
6. Oczyszczyć i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsce aplikacji.
7. Przykleić taśmę zgodnie z zasadami techniki kinesiotalpingu przekazanymi przez specjalistę (z odpowiednim rozciągnięciem taśmy, z początkiem i końcem oklejenia we właściwych punktach anatomicznych).
8. Początek i koniec oklejenia powinien zawsze być przyklejany bez napięcia, aby zapewnić stabilne mocowanie taśmy do ciała
9. Gotową aplikację należy delikatnie potrząsnąć, aby pod wpływem wytworzonego przez tarcie ciepła aktywował się klej.
10. Aplikację powinno się utrzymywać na ciele od 3 do 7 dni.
11. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnień skóry należy usunąć taśmę.
12. Aby usunąć taśmę należy odkleić jeden z jej brzegów, a następnie ciągnąć dalszy fragment taśmy wzdłuż kierunku rośnięcia włosów, drugą ręką przytrzymując skórę.

### UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą.
- Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Wyrób jednorazowy, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
- Wyrób niesterylny, nie stosować bezpośrednio na rany i uszkodzony naskórek.
- Podczas aplikacji taśmy należy przestrzegać zasad higieny.
- Obserwować miejsce aplikacji i usunąć taśmę jeśli doszło do jej zabrudzenia lub uszkodzenia.
- Taśmę chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest temperatura w przedziale od +5 do +30 °C, a wilgotność od 30% do 80%.



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
YT-55-Y	5cm x 5m	Żółty	1 szt.	144 szt.
YT-55-S	5cm x 5m	Cielisty	1 szt.	144 szt.
YT-55-X	5cm x 5m	Czarny	1 szt.	144 szt.
YT-55-P	5cm x 5m	Różowy	1 szt.	144 szt.
YT-55-B	5cm x 5m	Niebieski	1 szt.	144 szt.
YT-55-RZ	5cm x 5m	Tęczyowy zygzak	1 szt.	144 szt.
YT-55-4	5cm x 5m	1 x Czarny 1 x Cielisty 1x Różowy, 1 x Niebieski	4 szt.	36 x 4 szt.
YT-755-S	7,5cm x 5m	Cielisty	1 szt.	144 szt.
YT-755-X	7,5cm x 5m	Czarny	1 szt.	144 szt.

### WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU



znak CE



dyrektywa MD



nazwa i adres wytwórcy



numer katalogowy wyrobu



numer LOT określający numer partii wyrobu



wyrób jednorazowego użytku




wyrób niesterylny



wyrób nie zawiera lateksu



data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD

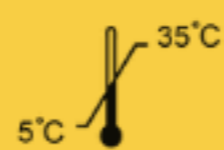

ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



wilgotność względna przechowywania



przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi



przechowywanie: chronić przed wilgocią



opakowanie nadające się do recyklingu