

yellowFOAM

TAŚMA PIANKOWA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

- Taśma wykonana z pianki polietylenowej pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym
- Dzięki elastyczności dopasowuje się do ruchów ciała, zapewniając przyleganie nawet w miejscach o dużej ruchomości
- Wodoodporna
- Bezlateksowa
- Dostępne kolory: cielisty
- Dostępne rozmiary: 5cm x 5m
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny
- Okres trwałości: 2 lata

ZASTOSOWANIE

- Wyrób przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania opatrunków pierwotnych, nieprzyklepnych nałożonych bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek. Naklejony na nieuszkodzony naskórek służy do ochrony przed otarciami.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i osuszone.
2. Wyjąć podkład z opakowania.
3. Z rolki odwinąć odcinek podkładu o odpowiedniej długości i odciąć przy pomocy nożyczek.
4. Owinąć podkład wokół miejsca aplikacji, tak aby osłonić skórę przed bezpośrednim kontaktem z warstwą klejącą taśmy sportowej.
5. Po założeniu taśm na warstwę podkładu należy skontrolować czy aplikacja nie została wykonana zbyt ciasno i nie występują cechy niedokrwienia.
6. Podkład należy ściągnąć bezpośrednio po zakończeniu aktywności na czas której został stworzony.
7. Aby usunąć opatrunek, można odklejać kolejne jego elementy lub rozciąć całość aplikacji uważając, żeby nie uszkodzić skóry znajdującej się pod taśmami.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Wyrób jednorazowego użytku. Ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
- Wyrób niejadalowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Podczas aplikacji podkładu należy przestrzegać zasad higieny.
- W razie wystąpienia objawów alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, czy wysypka, należy usunąć podkład i przerwać jego stosowanie.
- Miejsce aplikacji należy obserwować i w razie zauważenia cech niedokrwienia takich jak bledność, zasinienie należy zdjąć opatrunek i wykonać go ponownie z mniejszą siłą owinięcia.
- Chronić przed promieniowaniem słonecznym i przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest stała temperatura w przedziale od +5 do +30°C, a wilgotność od 30% do 80%.



WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

-  znak CE
-  dyrektywa MD
-  nazwa i adres wytwórcy
-  numer katalogowy wyrobu
-  numer LOT określający numer partii wyrobu
-  wyrób jednorazowego użytku
-  wyrób niesterylny
-  wyrób nie zawiera lateksu
-  data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD
-  ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
-  wilgotność względna przechowywania
-  przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi
-  przechowywanie: chronić przed wilgocią
-  opakowanie nadające się do recyklingu

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
YF-55-S	5cm x 5m	Cielisty	1 szt.	144 szt.